


Model til anlæggelse af urinkateter (LM-029)

Oversigt over komponenter:

1. "Ben"
2. Penis
3. Abdomen
4. Urinrørsudmunding
5. Scrotum
6. "Boks"
7. Urinrør
8. Prostata

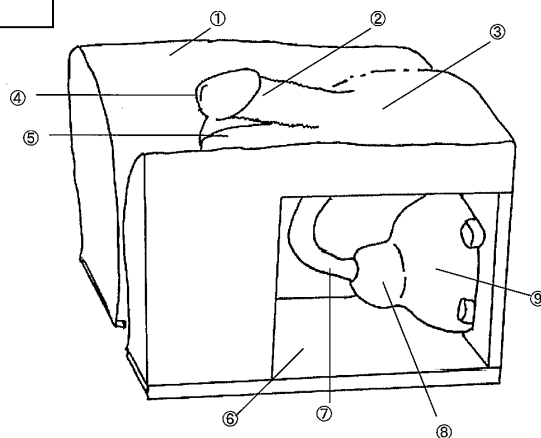

Anvendelse:


- Brug et **kateter størrelse 16FR eller mindre**
- Påfør altid gel på kateteret. Hvis der mærkes modstand sprøjtes gel direkte ind i urinrøret. Indfør aldrig kateteret med magt.
- Under epidermis er kroppen lavet af svamp. Pas på ikke at gennemvæde den.

Efter brug:

- Skyl urinrøret igennem med vand ved at holde urinrørsudmunding direkte under vandhanen
- Vask de øvrige dele med vand eller en mild sæbeopløsning
- Lad modellen tørre grundigt efter brug

Oversigt over komponenter:

9. "Ben"
10. Penis
11. Abdomen
12. Urinrørsudmunding
13. Scrotum
14. "Boks"
15. Urinrør
16. Prostata

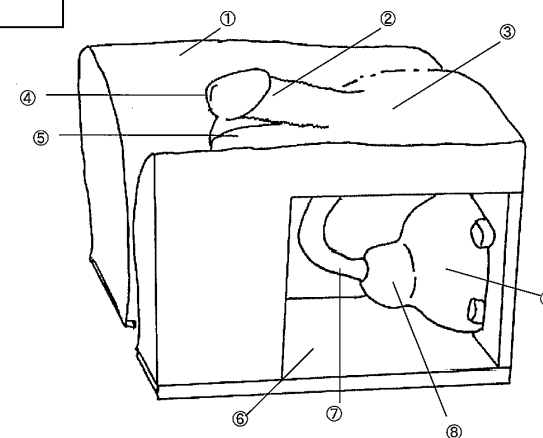

Anvendelse:

- Brug et **kateter størrelse 16FR eller mindre**
- Påfør altid gel på kateteret. Hvis der mærkes modstand sprøjtes gel direkte ind i urinrøret. Indfør aldrig kateteret med magt.
- Under epidermis er kroppen lavet af svamp. Pas på ikke at gennemvæde den.

Efter brug:

- Skyl urinrøret igennem med vand ved at holde urinrørsudmunding direkte under vandhanen
- Vask de øvrige dele med vand eller en mild sæbeopløsning
- Lad modellen tørre grundigt efter brug